

URGO Aqua-Protect

Cerotti pretagliati per la protezione delle ferite superficiali/Cerotti da tagliare per la protezione delle ferite superficiali.

ISTRUZIONI D'USO

- Cerotti pretagliati: Pulire, disinfettare, risciacquare e asciugare la ferita e la zona circostante. Applicare la medicazione accuratamente, lisciando i bordi. Sostituire due volte al giorno.
- Cerotti da tagliare: Pulire, disinfettare, risciacquare e asciugare la ferita e la zona circostante. Tagliare il cerotto usando forbici pulite e disinfettate. Applicare il cerotto. Sostituire due volte al giorno.

PRECAUZIONI D'USO

Non adatto ai bambini al di sotto dei 3 anni di età. In caso di corpi estranei nella ferita, di importante fuoriuscita di sangue, di morso, di puntura con un oggetto affilato e/o sporco oppure se non si vedono miglioramenti nei 6 giorni successivi all'applicazione, chiedere un consiglio al proprio farmacista o medico.

EFFETTI SECONDARI

Come ogni cerotto, il prodotto può causare reazioni cutanee come dermatiti, irritazioni o dolore alla rimozione.

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFEZIONE O REAZIONE CUTANEA

Osservare rigorosamente le istruzioni d'uso. Non riutilizzare un cerotto già usato.

Non utilizzare su ferite più lunghe o larghe della compressa e che rischiano di debordare. Non applicare sugli occhi, su pelle sottile o su mucosa. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Non utilizzare un prodotto danneggiato.