

URGO Sensitive-Stretch: per la protezione delle ferite superficiali.

ISTRUZIONI PER L'USO

- **Cerotti:** Pulire, disinfettare, sciacquare ed asciugare accuratamente la ferita e la pelle circostante. Applicare la medicazione facendo aderire bene i bordi. Sostituire la medicazione almeno due volte al giorno.
- **Cerotti a taglio:** Pulire, disinfettare, sciacquare ed asciugare accuratamente la ferita e la pelle circostante. Tagliare il cerotto utilizzando un paio di forbici pulite e disinfettate. Applicare la medicazione. Sostituire la medicazione almeno due volte al giorno.
- **Compresa:** Compresa antiaderente impregnata di soluzione antisettica (cloruro di benzalconio: 960 mg/m²) che agisce da protezione antimicrobica in caso di ferite superficiali.

PRECAUZIONI D'USO

A causa della presenza di cloruro di benzalconio, questo prodotto può provocare reazioni cutanee.