

URGO Ustioni superficiali impermeabile

DESCRIZIONE

Medicazione sterile pronta all'uso in busta singola monouso composta da: un supporto adesivo, una compressa spessa assorbente, una garza lipido-colloidale, non adesiva e aerata, costituita da una trama impregnata di particelle di idrocolloide e di vaselina.

Disponibile in 2 formati: 5x7 cm e 10 x 7 cm.

INDICAZIONI

Trattamento delle ustioni di primo grado, di secondo grado superficiali, nonché di ferite superficiali.

CHE COS'È UNA FERITA SUPERFICIALE?

Una ferita (o un taglio) viene definita superficiale quando raggiunge solo la pelle e il grasso immediatamente sottostante. Se una ferita superficiale accidentale a una dimensione superiore a 3 cm, è consigliabile consultare un medico, entro 6 ore dall'incidente, per determinare se la ferita deve essere suturata o trattata (incollatura con colla chirurgica specifica...).

CHE COS'È UN'USTIONE?

Si tratta di una lesione dei tessuti spesso dovuta a un contatto più o meno prolungato con una fonte di calore.

Un'ustione può presentare diversi gradi di gravità:

- Primo grado: scottature solari, ustioni domestiche, contatto breve con una fiamma. La pelle è intatta ma rossa e dolorante, non presenta vescicole né lacerazioni. La guarigione avviene spontaneamente dopo 5-6 giorni.
- Secondo grado superficiale: è presente una vescicola contenente un liquido trasparente. Il dolore è forte e il derma è rosso. La guarigione avviene spontaneamente dopo 10 giorni.
- Secondo grado profondo: è provocata dal contatto prolungato con una fonte di calore (acqua, olio bollente,..). Le vescicole sono solitamente perforate. Sotto tali vescicole il derma è scolorito, il dolore è moderato. L'epidermide è distrutta e necessita di cure mediche.
- Terzo grado: la pelle è indurita, bianca o brunastra, insensibile, totalmente distrutta e necessita di cure in ospedale.

PROPRIETÀ E MODALITÀ D'AZIONE

Supporto semipermeabile traspirante, permeabile al vapore acqueo ma impermeabile all'acqua, limita i rischi di contaminazione esterna. ASSORBE GLI ESSUDATI grazie alla compressa. ALLEVIA rapidamente il dolore. FAVORISCE LA CICATRIZZAZIONE: a contatto con gli essudati della ferita, grazie alla garza lipido-colloidale (brevetto internazionale depositato), si forma un gel che crea le condizioni favorevoli alla cicatrizzazione in ambiente umido. La garza SI RIMUOVE SENZA DOLORE dato che non aderisce alla ferita.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

In caso di ustione:

mettere immediatamente l'ustione sotto l'acqua fredda (ma non gelata) e tenervela per 15 minuti per limitare l'estensione dell'ustione. In caso di vescicola, non forarla.

In tutti i casi:

1. Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone. Pulire la ferita con acqua o soluzione fisiologica. Disinfettare la ferita e la zona circostante con una soluzione antisettica senza alcool; in caso di ustione, non utilizzare mai antisettici colorati tipo eosina. Risciacquare con acqua o soluzione fisiologica.
2. Con una compressa di garza sterile asciugare accuratamente la lesione e la zona circostante. Fermare l'eventuale sanguinamento comprimendo.
3. Aprire la busta ed estrarre la medicazione. La medicazione deve essere utilizzata immediatamente dopo l'apertura della busta.

4. Quando si applica la medicazione fare attenzione a non toccare la parte adesiva con le dita e accertarsi di centrare la compressa di garza (parte bianca) sulla lesione: Togliere la 1ª aletta di protezione; applicare lisciando la medicazione verso i bordi: per evitare che si formino pieghe e punti di tensione sulla pelle e sulla medicazione. Togliere la 2ª aletta procedendo nello stesso modo.

FREQUENZA DI SOSTITUZIONE

Ripetere l'applicazione, seguendo le modalità d'uso, dopo 24 ore, ed in seguito ogni 48 ore fino a guarigione completa. Sostituire la medicazione anche: se la compressa sembra umida dopo la doccia; se la compressa è satura di sangue o di essudati.

RIMOZIONE DE LA MEDICAZIONE

Rimuovere delicatamente la medicazione. Se dopo aver tolto la medicazione resta del gel sulla ferita, sciacquarla con acqua.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare al riparo dalla luce.

PRECAUZIONI PER L'USO

- Riservato al trattamento localizzato di ferite superficiali la cui dimensione non superi il formato di una compressa. Sulle ustioni, la compressa deve superare ampiamente l'ustione per permettere l'assorbimento degli essudati (la dimensione della compressa, parte bianca della medicazione, deve essere almeno due volte più grande delle dimensioni dell'ustione).
- In caso di corpi estranei nella ferita, di forte sanguinamento, di morsi, di ferita con un oggetto appuntito e/o sporco o se non si nota alcun miglioramento in termini di guarigione dopo 6 giorni, consultare il proprio farmacista o il medico.
- Per le ustioni nei bambini, rivolgersi al proprio farmacista o al medico.
- In presenza di segni clinici di infezione locale (calore, arrossamento esteso alla pelle non lesa, dolore, secrezione purulenta, gonfiore...), consultare il proprio farmacista o il medico.
- Chiedere consiglio al farmacista o al medico prima di applicare la medicazione sul viso, per motivi estetici.
- Le persone diabetiche devono utilizzare le medicazioni idrocolloidali unicamente sotto controllo medico o infermieristico.

AVVERTENZE

- Il riutilizzo di un prodotto monouso può comportare il rischio di infezione.
- Controllare che la busta monouso sia integra, il che garantisce la sterilità del prodotto prima dell'uso.
- Non utilizzare se la confezione è danneggiata.
- L'adesività della medicazione può essere ridotta dalla presenza di peli, di sostanze grasse (creme...) o su zone con mobilità articolare importante.
- Non adatto per fare il bagno.

CONTROINDICAZIONI

- Non usare in caso di ustioni di secondo grado profonde e di ustioni di terzo grado. In questi casi, è obbligatorio consultare un medico.
- Non applicare sulle mucose.
- Non utilizzare per coprire o fissare/mantenere in posizione un dispositivo.
- Controindicato per il piede ischemico.
- Controindicato per il piede diabetico infetto.
- Non utilizzare per più di 30 giorni consecutivi.