

# URGO Ustioni e Ferite Superficiali

Cerotti o garze sterili pronti all'uso per il trattamento di ustioni superficiali domestiche di 1° e 2° grado e di ferite superficiali.

## Cos'è un'ustione?

È una lesione dei tessuti spesso dovuta ad un contatto più o meno prolungato con una fonte di calore.

L'ustione presenta diversi gradi di gravità:

1° grado: ad esempio scottatura solare, contatto rapido con una fiamma. La lesione è di colore rosso vivo e dolente. La guarigione avviene spontaneamente nel giro di 5 - 6 giorni.

2° grado superficiale: si forma una bolla. La guarigione avviene spontaneamente nel giro di 10 giorni.

2° grado profondo: è provocata da un contatto prolungato con una fonte di calore (acqua, olio bollente). L'epidermide è distrutta e necessita di cure mediche.

3° grado: la pelle è totalmente distrutta e necessita di cure ospedaliere.

## Come agisce URGO USTIONI E FERITE SUPERFICIALI?

URGO USTIONI E FERITE SUPERFICIALI è disponibile in due formati:

- Nel formato garza sterile in confezione monouso (formato piccolo e grande).
- Nel formato cerotto pronto all'uso in confezione monouso (formato piccolo e grande), composto da un supporto estensibile e confortevole e da una compressa spessa che assicura l'assorbimento degli essudati.

### La garza:

- Non aderisce, porosa, è costituita da una trama in poliestere impregnata di particelle idrocolloidali (carbossimetilcellulosa) e vaselina.
- Al contatto con gli essudati della ferita, si forma un gel lipido-colloidale che crea le condizioni favorevoli alla cicatrizzazione in ambiente umido. Questo gel sparisce con il risciacquo al cambio del cerotto.

### La garza lipido-colloidale brevettata:

- ALLEVIA rapidamente il dolore
- FAVORISCE LA CICATRIZZAZIONE
- SI RIMUOVE SENZA DOLORE poiché non aderisce alla ferita.

## ISTRUZIONI PER L'USO

In caso di ustione di 2° grado superficiale: tenere la ferita sotto l'acqua fredda per 15 minuti per limitare l'estensione dell'ustione.

In tutti i casi: Pulire la ferita con un antisettico senza alcol. Risciacquare con acqua o soluzione fisiologica. In caso di ustione, non utilizzare mai antisettici colorati tipo eosina. Asciugare con cura utilizzando una compressa sterile. Ove possibile, non toccare la bolla che è una protezione contro l'infezione. Se la bolla si buca, disinfettarla. Non è necessario togliere la pelle morta se non si rimuove da sola. Togliere le alette di protezione. Applicare sulla zona da medicare. In caso di garza semplice, se necessario, tagliarla nel formato desiderato utilizzando forbici pulite e disinfettate, quindi coprire con una medicazione secondaria di tipo compressa sterile fissata mediante una benda elastica o un cerotto. Non è necessario spalmare una crema prima di applicare il cerotto. La normale durata del trattamento è di 5-6 giorni con cambio del 1° cerotto dopo 24 ore ed in seguito ogni 48 ore.

## CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare in caso di ustioni di 2° grado profonde, di 3° grado o di ustioni sul viso. In questi casi, è obbligatorio consultare un medico.

**PRECAUZIONI D'USO**

Destinato esclusivamente al trattamento di ferite localizzate le cui dimensioni non superino il formato della compressa. Sulle ustioni estese, la compressa deve debordare oltre il perimetro della ferita per consentire l'assorbimento dell'essudato. Se non si constata alcun miglioramento della cicatrizzazione nel giro di 6 giorni, consultare il medico. Per le ustioni nei bambini, chiedere al farmacista. In presenza di sintomi clinici di infezione locale (il rossore si estende alla pelle sana, dolori, ecc.), consultare il farmacista o il medico.

Il cerotto o la garza URGO USTIONI E FERITE SUPERFICIALI devono essere usati immediatamente dopo l'apertura della busta; conservare al riparo dalla luce.

**AVVERTENZE**

Il riutilizzo di un prodotto monouso può comportare il rischio di infezione.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata.