

# **UGO Waterproof-Impermeabile: per la protezione di ferite superficiali**

## **ISTRUZIONI PER L'USO**

1. Pulire, disinfettare, sciacquare ed asciugare accuratamente la ferita e la pelle circostante.
2. Applicare la medicazione facendo aderire bene i bordi.
3. Sostituire la medicazione almeno due volte al giorno.

## **COMPRESSA**

Compresa antiaderente impregnata di soluzione antisettica (cloruro di benzalconio: 960 mg/m<sup>2</sup>) che agisce da protezione antimicrobica in caso di ferite superficiali.

## **PRECAUZIONI D'USO**

A causa della presenza di cloruro di benzalconio, questo prodotto può provocare reazioni cutanee.