

# URGO Spray lesioni della bocca

(Preparato protettivo della mucosa orale - spray gengivale) Flacone 15 mL.

## DESCRIZIONE PRODOTTO

URGO Spray lesioni della bocca è un dispositivo medico innovativo che rappresenta un'evoluzione all'impiego dell'acido ialuronico, il polisaccaride ubiquitariamente presente nei tessuti del corpo umano dove svolge diverse e fondamentali funzioni biologiche. Grazie alle sue proprietà filmogene e idratanti consente un'azione protettiva mantenendo le cellule epidermiche della mucosa in uno stato di trofismo tale da favorire indirettamente il processo di rigenerazione cellulare della mucosa lesa.

L'integrità del tessuto epiteliale della cavità orale (mucosa orale) è di fondamentale importanza per assicurare la naturale funzione protettiva che esso svolge nei confronti delle aggressioni da agenti patogeni (microrganismi e sostanze tossiche) responsabili di compromettere ed aggravare l'evoluzione della lesione stessa.

L'aspetto innovativo della composizione di URGO Spray lesioni della bocca è l'impiego dell'acido ialuronico a basso peso molecolare e bassa viscosità che svolge un'azione protettiva grazie alle sue proprietà filmogene. URGO Spray lesioni della bocca è ben tollerato dalla mucosa orale, non comporta effetti indesiderati e non ha controindicazioni specifiche. URGO Spray lesioni della bocca può essere utilizzato senza particolari restrizioni.

## INDICAZIONI

URGO Spray lesioni della bocca è indicato sia a scopo preventivo, per conservare l'integrità della mucosa orale, sia a scopo protettivo in grado di favorire;

indirettamente il processo fisiologico di riparazione delle lesioni della mucosa, quale che sia la causa responsabile: interventi odontostomatologici come ablazione del tartaro, protesi mobili, lesioni della mucosa orale dovute a cause diverse (infettive, contusioni, farmacologiche) e lesioni delle gengive, in particolari lesioni della mucosa del cavo orofaringeo.

Inoltre il prodotto è anche indicato come protettivo e coadiuvante nel trattamento delle afte in quanto, oltre ad alleviarne il dolore, ne promuove la guarigione.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Direzionare l'erogatore verso destra/sinistra o verso l'alto. Schiacciare il tappo erogatore fino ad attivare la pompetta. Applicare sulla mucosa orale interessata dalle lesioni. Abbassare il beccuccio erogatore e riporre nell'astuccio il flaconcino dopo l'utilizzo. L'applicazione deve essere fatta almeno 3 volte al giorno al fine di mantenere a lungo il film protettivo sulla parte da trattare. Per lo stesso motivo se ne consiglia l'utilizzo dopo i pasti e dopo aver provveduto alla corretta igiene orale; l'applicazione, se necessario, può essere ripetuta nel corso della giornata avendo cura di distanziare adeguatamente l'introduzione di cibo per mantenere l'efficacia della composizione sulla mucosa orale. Grazie alla cannula, il prodotto può essere orientato verso lesioni del cavo orale difficili da raggiungere.

## COMPOSIZIONE

Aqua (Water), Glycerin, Sodium Hyaluronate, PVP, PVM/MA Copolymer, Disodium EDTA, Potassium acesulfame, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Sodium Benzoate, Flavourings (Aromas).

## AVVERTENZE

Sospendere il trattamento in caso di fenomeni irritativi o di ipersensibilità al prodotto, consultando il proprio medico qualora i sintomi persistessero.

La funzionalità e la sicurezza del prodotto sono garantite esclusivamente dall'integrità della confezione primaria.

Leggere le istruzioni per l'uso.

Conservare fuori della portata dei bambini. Il prodotto non è stato testato nei bambini.

Lavare l'ugello con acqua calda, asciugarlo con un foglio di carta pulito e ripiegare il beccuccio dopo ogni utilizzo.

