

URGO Afte e piccole lesioni bocca

Cerotto liquido pronto all'uso per il trattamento di afte (alla comparsa di 1 - 2 afte <1 cm di diametro) e piccole ferite della mucosa orale.

COS'È UN'AFTA?

È una lesione superficiale della mucosa orale che si manifesta come un'ulcera dolorosa con bordi netti ed interno bianco, dal contorno di colore rosso vivo.

Le cause dell'insorgenza sono scarsamente conosciute, sebbene alcuni fattori possano promuoverne la comparsa:

ereditarietà, determinati alimenti, traumi fisici (morso delle mucose orali, presenza di protesi dentarie), alcuni farmaci, stress oppure cambiamenti ormonali.

COME AGISCE URGO AFTE?

Una volta applicato, si forma un film protettivo, visibile, sottile ed elastico che:

- Isola da cibo e saliva fino a 4 ore
- Allevia il dolore rapidamente e a lungo
- Favorisce la cicatrizzazione

INDICAZIONI PER L'USO

Rimuovere il prodotto in eccesso dall'applicatore sul bordo del flacone

Applicare sulla lesione la quantità restante e spalmare con l'aiuto dell'applicatore fino a ricoprire la zona da trattare.

Lasciare asciugare una decina di secondi e chiudere la bocca: si formerà un film visibile. Se la lesione non è ricoperta correttamente, ripetere operazione.

Applicare Urgo Afte Filmogel® all'occorrenza, fino ad un massimo di 4 volte al giorno e preferibilmente prima dei pasti principali, fino a cicatrizzazione completa (3-5 giorni).

Fino a quando il film resta visibile, non è necessario rinnovare l'applicazione.

L'igiene del prodotto è garantita dalla sua composizione, non è necessario pulire l'applicatore dopo l'uso.

COMPOSIZIONE

Derivato cellulosico, acido minerale, acidi carbossilici, alcol, acqua, aroma, sucralosio.

CONTROINDICAZIONI

Non applicare in caso di afte più grandi (di diametro >1 cm) o erpetiformi (afte di minuscola dimensione presenti in grande numero) le quali, necessitano di un controllo medico.

Non applicare sulle ferite infette, sulle bruciature e le ferite profonde (che sanguinano).

Non utilizzare in caso di allergia ai derivati salicilici.

In assenza di studi si consiglia di non usare in gravidanza e in allattamento.

PRECAUZIONI

Richiudere sempre il flacone dopo l'utilizzo.

Dopo l'apertura, si consiglia di consumare il prodotto entro 6 mesi.

Applicare unicamente sulla mucosa orale.

Al momento dell'applicazione può provocare una transitoria sensazione di fastidio e bruciore.

Non utilizzare nei bambini al di sotto dei 6 anni di età.

Non raschiare, una volta formato il film scomparirà da solo.

In assenza di miglioramenti dopo 5 giorni di trattamento, consultare un medico.

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non ingerire il contenuto del flacone.

Non fumare durante l'applicazione, prima della completa asciugatura del prodotto o vicino al flacone aperto.

In caso di dubbi, chiedere consiglio al farmacista.

In caso di ferite della bocca causate da un apparecchio o protesi dentale, è possibile usare il prodotto purché il film non venga ricoperto dal dispositivo stesso.

CONSERVAZIONE

Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sulla confezione. Tenere lontano da fiamme o scintille.

Conservare ad una temperatura inferiore ai 30°C.