

URGO GENGIVITI & DENTI SENSIBILI

Il gel URGO GENGIVITI & DENTI SENSIBILI è stato progettato per curare le gengiviti e la sensibilità dei denti.

COME FUNZIONA URGO GENGIVITI & DENTI SENSIBILI?

La formula (Actimins) è stata progettata per formare degli strati sulla superficie dei denti e all'interno del tubulo dentinale; questa azione consente di chiudere il tubulo fornendo quindi protezione dall'ipersensibilità del dente. Distrugge inoltre i batteri responsabili della placca dentale e delle gengiviti.

ISTRUZIONI PER L'USO

Trattamento della gengivite e della placca dentale o della sensibilità dentale:

Spremete una quantità adeguata di gel su un tampone di cotone o un dito. Quindi spalmate sui denti sensibili o sulla placca su denti e gengive e lasciate agire per 2 minuti (denti sensibili) o per 3 minuti (placca dentale e gengiviti), quindi sciacquare la bocca con acqua pulita.

POSOLOGIA

Applicate il gel una volta alla mattina e una volta alla sera. Qualora dopo 1 mese di trattamento non si riscontrino nessun miglioramento dei sintomi, si consiglia di rivolgersi al medico.

PRECAUZIONI PER L'USO

- In assenza di un parere medico favorevole, questo prodotto non è idoneo per: donne in fase di allattamento e donne in gravidanza, diabetici.
- Non adatto a bambini di età inferiore ai 12 anni senza il parere di un dentista o di un medico.
- Non superare 1 mese di trattamento. Dopo un uso ripetuto, rispettare un periodo di 1 mese prima di usare nuovamente il prodotto.
- Questo prodotto è un dispositivo medico e non deve essere usato come un dentifricio. Non ingoiare.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in pazienti con una nota allergia agli ingredienti contenuti nel prodotto.

INGREDIENTI

5-15% Actimins (ingrediente attivo), Glicole polietilenico, Glicerolo e Biossido di silicio.

Actimins è composto da biossido di silicio, bicarbonato di sodio, carbonato di calcio e anidride fosforica.

EFFETTI COLLATERALI

Al primo utilizzo, alcuni pazienti potrebbero avvertire una leggera sensazione granulosa e una sensazione di bruciore, dovute all'attività e agli effetti di Actimins. Se i pazienti si sentono seriamente a disagio in fase di utilizzo del prodotto, interromperne l'uso.

CONSERVAZIONE

Conservazione a temperatura ambiente. Si prega di utilizzare il gel entro due mesi dall'apertura. Il coperchio del tubetto deve essere chiuso saldamente dopo l'uso. L'ingrediente principale, Actimins assorbe facilmente l'umidità, il che può ridurre gli effetti del prodotto.

Si prega di non utilizzare il dispositivo oltre la data di scadenza.