

URGO Herpes Labiale

INDICAZIONI

URGO Herpes Labiale è indicato per la protezione ed il trattamento delle lesioni e dei sintomi causati dalle vescicole dell'herpes labiale e va utilizzato sin dai primi sintomi (prurito, pizzicore e sensazione di bruciore) fino alla scomparsa completa dell'herpes.

URGO Herpes Labiale è un filmogel che forma un film curativo, discreto ed isolante, efficace ad ogni stadio dell'herpes, che:

- Allevia il prurito, il pizzicore ed il bruciore
- Limita la fuoriuscita dell'herpes
- Limita la fuoriuscita di vescicole e croste
- Promuove la guarigione
- Impedisce la contaminazione.

MODALITÀ D'USO

Mediante l'applicatore monouso, coprire l'herpes con uno strato sottile di prodotto. Dopo l'applicazione si può percepire una sensazione transitoria di prurito o bruciore.

Lasciare asciugare per 1-2 minuti per permettere al film di formarsi. Il tempo di asciugatura dipende dalla quantità di prodotto applicata.

Sull'herpes si formerà un film trasparente.

Rinnovare l'applicazione dalle 2 alle 4 volte al giorno al massimo, quando la pellicola non ricopre più l'herpes.

Proseguire il trattamento fino a guarigione completa.

Il filmogel può essere usato fin dai primi sintomi (prurito, pizzicore, sensazione di bruciore) per limitare la fuoriuscita dell'herpes.

URGO Herpes Labiale è stato progettato per un'applicazione pratica, sicura ed igienica.

CONTROINDICAZIONI

Non applicare nei casi riportati qui di seguito:

- Su herpes labiali di diametro superiore a 1 cm per i quali è necessario un parere medico.
- In caso di infezione batterica e/o in caso di rischio di infezione batterica (impetigine).
- In caso di immunodepressione (data da malattie croniche e/o chemioterapia).
- In caso di eczema atopico.

Non usare in caso di allergia a uno dei componenti.

In assenza di studi su donne incinte o che allattano, l'uso del prodotto non è raccomandato.

PRECAUZIONI D'USO

Applicazione esclusivamente cutanea.

All'applicazione si può percepire una sensazione transitoria di prurito.

Non usare sui bambini di età inferiore ai 6 anni.

Non applicare vicino agli occhi.

Evitare qualsiasi rischio di contatto con gli occhi. Irritante per gli occhi.

Chiudere bene il flacone dopo l'uso.

Non riutilizzare l'applicatore (monouso).

Non ingerire.

Non fumare durante l'applicazione, prima della completa asciugatura del prodotto o vicino al flacone aperto.

Infiammabile allo stato liquido.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non è necessario rimuovere il film residuo prima di una nuova applicazione.

Se necessario, il film può essere rimosso riapplicando il prodotto e pulendo immediatamente con una garza.

Consultare il medico o il farmacista in caso di dubbi o se:

- soffrite di più di 6 focolai di infezioni di herpes all'anno,
- non si nota un miglioramento dopo 7 giorni.

CONSERVAZIONE

Non superare la data di scadenza indicata sulla confezione.

Da conservare lontano da fiamme e scintille, ad una temperatura inferiore a 40°C.

COMPOSIZIONE

Derivato cellulosico, acido minerale, acido carbossilico, olio vegetale, alcol e acqua.

REGOLE IGIENICHE DA SEGUIRE DURANTE LA FUORIUSCITA DELL'HERPES

Grazie alla formazione di una pellicola sottile e discreta, la tecnologia Filmogel® di Urgo Herpes Labiale permette di isolare l'herpes.

Per evitare i rischi di autocontagio o di contaminazione altrui, è importante rispettare sempre le regole di igiene riportate qui di seguito.

- Evitare di baciare altre persone ed i bambini molto piccoli.
- Lavare accuratamente le mani in caso di contatto con herpes.
- Non strofinare occhi e palpebre.
- Se si indossano lenti a contatto non umidificarle mai con la saliva.
- Evitare di toccare o grattare l'herpes.