

# URGO Piccoli Tagli

Cerotto liquido pronto all'uso per il trattamento di piccole ferite superficiali (tagli).

## COME AGISCE URGO PICCOLI TAGLI?

La sua formula crea un ambiente che favorisce la guarigione.

Una volta applicato, si forma un film discreto e flessibile che:

- PROTEGGE dalle aggressioni esterne
- ALLEVIA il dolore
- PROMUOVE LA GUARIGIONE
- RESISTE ALL'ACQUA

## MODALITÀ D'USO

Per le persone di età inferiore ai 16 anni, deve essere applicato da un adulto. (Spalmare il prodotto con l'aiuto della spatola in modo tale da poter coprire il taglio su tutta la sua lunghezza. Lasciare asciugare per qualche secondo. Rinnovare l'applicazione 2 o 3 volte al giorno fino a guarigione completa.

Richiudere bene il prodotto dopo l'applicazione. Se necessario, il prodotto può essere rimosso applicando una goccia sulla pellicola preesistente già formata e tamponando immediatamente con una garza asciutta. L'igiene del prodotto è garantita dalla sua composizione, non è quindi necessario ripulire la spatola dopo l'uso. Dopo l'apertura, si consiglia di utilizzare il prodotto entro 6 mesi.

## COMPOSIZIONE

Olio di germe di grano - Nitrocellulosa - Isopropanolo - Acetato di etile – Etanolo - Idrossipropilcellulosa - Olio di ricino.

## CONTROINDICAZIONI

Non usare in caso di ferite infette, infezioni fungine, bruciate e ferite sanguinanti.

Non usare sulle mucose (delle labbra in particolare).

In assenza di studi, si consiglia di non usare in gravidanza e in allattamento.

## PRECAUZIONI

Applicazione esclusivamente cutanea. Il prodotto deve essere applicato da un adulto. Da applicare su ferite locali. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non usare nei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Non fumare durante l'applicazione, prima della completa asciugatura del prodotto o vicino al flacone aperto. All'applicazione si può percepire una sensazione di bruciore. In caso di dubbio consultare il farmacista. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi. Irritante per gli occhi. Il prodotto può essere utilizzato da pazienti diabetici previo consulto medico.

## CONSERVAZIONE

Non superare la data di scadenza indicata sulla confezione.

Da conservare lontano da fiamme e scintille, ad una temperatura inferiore ai 25°C.