

# URGO Ustioni e Ferite Superficiali - Garze

Medicazioni o garze sterili pronte all'uso per il trattamento di ustioni domestiche di primo grado, di secondo grado superficiali, nonché di ferite superficiali.

## Che cos'è un'ustione?

Si tratta di una lesione dei tessuti spesso dovuta a un contatto più o meno prolungato con una fonte di calore. Un'ustione può presentare diversi gradi di gravità:

- primo grado: scottature solari, contatto rapido con una fiamma. La lesione è intatta ma di colore rosso vivo e dolente, non presenta vescicole o lacerazioni. La guarigione avviene spontaneamente dopo 5-6 giorni.
- secondo grado superficiale: è presente una vescicola piena di liquido trasparente. Il dolore è forte ed il derma rosso. La guarigione avviene spontaneamente dopo 10 giorni.
- secondo grado profondo: deriva dal contatto prolungato con una fonte di calore (acqua, olio bollente,...). Le vesciche sono generalmente perforate. Al di sotto di queste vesciche il derma è scolorito, il dolore è moderato. L'epidermide è distrutta e necessita di cure mediche.
- terzo grado: la pelle è totalmente distrutta e necessita di cure ospedaliere.

## Come agisce URGO USTIONI E FERITE SUPERFICIALI?

URGO USTIONI E FERITE SUPERFICIALI è disponibile in 2 formati:

- sotto forma di garza sterile in busta singola monouso (formato piccolo e grande)
- sotto forma di medicazione pronta all'uso in busta singola monouso (formato piccolo e grande), costituita da un supporto elastico e confortevole, nonché da una compressa spessa che garantisce l'assorbimento degli essudati.

### La garza:

- non adesiva, aerata, è costituita da un tessuto in poliestere impregnato di particelle di idrocolloide (carbrossimetilcellulosa) e vaselina.
- A contatto con gli essudati della ferita, si forma un gel lipido-colloidale che crea le condizioni favorevoli alla cicatrizzazione in ambiente umido.
- Tale gel scompare mediante risciacquo quando la medicazione viene sostituita.

### La sua garza lipido-colloidale brevettata:

- ALLEVIA rapidamente il dolore
- FAVORISCE LA CICATRIZZAZIONE
- SI RIMUOVE SENZA DOLORE dato che non aderisce alla ferita

## MODALITÀ D'USO

In caso di ustioni di secondo grado superficiali: tenere prima la ferita sotto l'acqua fredda per 15 minuti, al fine di limitare l'estensione dell'ustione.

In tutti i casi: Pulire la ferita con un antisettico senza alcol. Risciacquare con acqua e soluzione salina. In caso di ustione, non usare mai antisettici colorati tipo eosina. Lasciare asciugare con cura servendosi di una compressa sterile. Ove possibile, non toccare la vescicola, che agisce da protezione contro l'infezione. Se si fora disinfettarla. Non occorre togliere la pelle morta se non si stacca da sola. Togliere le alette di protezione. Applicare sulla zona da medicare. Nel caso della sola garza, se necessario, tagliarla secondo il formato desiderato utilizzando forbici pulite e disinfettate; quindi coprirla con una medicazione secondaria tipo una compressa sterile tenuta in posizione da una benda per fasciature o da un nastro adesivo chirurgico. Il previo utilizzo di eventuali creme è inutile. La durata abituale del trattamento varia da 5 a 6 giorni, con sostituzione della prima medicazione dopo 24 ore e, in seguito, ogni 48 ore.

## CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare in caso di ustioni di secondo grado profondo, di terzo grado o in caso di ustioni sul volto. In questi casi, è obbligatorio consultare preventivamente un medico.

**PRECAUZIONI PER L'USO**

Riservato al trattamento localizzato di ferite la cui dimensione non superi il formato di una compressa. Su ustioni estese, è auspicabile che la compressa sporga leggermente oltre il perimetro della ferita per consentire l'assorbimento degli essudati. Se non si nota alcun miglioramento in termini di cicatrizzazione dopo 6 giorni, consultare il proprio medico. In presenza di segni clinici di infezione locale (arrossamenti che si estendono alla pelle non lesa, dolori...), di corpi estranei nella ferita, di forte sanguinamento, di morso, di ferita con un oggetto appuntito e/o sporco, consultare il proprio medico o farmacista. La medicazione o la garza URGO USTIONI E FERITE SUPERFICIALI deve essere usata immediatamente dopo l'apertura; conservare lontano dalla luce.

**AVVERTENZE**

Il riutilizzo di un prodotto monouso può comportare il rischio di infezione. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.