

URGO SOS Cut-benda autoadesiva

Benda autoadesiva che può essere tagliata senza forbici destinata a bloccare il sanguinamento di piccoli tagli e ferite superficiali mediante compressione

ISTRUZIONI PER L'USO

• Per la 1ª applicazione:

1. Srotolare la benda fino alla lunghezza desiderata.
2. Avvolgere la benda creando 2 o 3 strati con leggere sovrapposizioni su tutta l'area della ferita per bloccare la fuoriuscita di sangue.
3. Stringere l'estremità per bloccare la benda, quindi tirarla nel senso della lunghezza fino a quando non si strappa.
4. Togliere la benda quando la fuoriuscita di sangue sarà cessata e al massimo dopo 30 minuti dall'applicazione.
5. Pulire, disinfettare, risciacquare e asciugare la ferita.
6. Ove necessario, applicare una medicazione adeguata

• Per le applicazioni successive:

- Come misura igienica, non usare la parte che sporge dalla confezione.
- Prima di riutilizzare il prodotto, tagliare e gettare la parte che sporge dalla confezione.
- Utilizzare nel modo descritto per il 1° utilizzo.

Autoadesiva, la benda aderisce da sola!

PRECAUZIONI PER L'USO

• Per evitare un effetto laccio emostatico (rischio di edema o necrosi):

• Non applicare per più di 30 minuti.

-Durante l'applicazione, evitare una tensione troppo forte al fine di garantire la circolazione sanguigna.

- Qualora si avvertissero sensazioni sgradevoli (sensazione di formicolio, disturbi alla sensibilità...), togliere o allentare immediatamente la benda.

- Successivamente all'applicazione della benda, non utilizzare oggetti che potrebbero impigliarsi nella benda.

- Non applicare ulteriormente una volta che la fuoriuscita di sangue sarà cessata.

• Per evitare il rischio di infezione:

- Non riutilizzare una porzione di benda utilizzata in precedenza. Il riutilizzo di un prodotto monouso può provocare rischi di infezione.

• Fare attenzione a non toccare la parte della benda che sarà a contatto con la ferita.

• Conservare il prodotto all'interno della sua confezione originale.

• Consultare un medico se il sanguinamento non si arresta dopo 15 minuti, in particolare se si assumono farmaci anticoagulanti o se il sanguinamento è copioso o a getto.

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare: nei bambini al di sotto di 3 anni di età, nelle persone diabetiche.

EFFETTI INDESIDERABILI

Come qualsiasi prodotto che è a contatto con la pelle, questo prodotto può provocare reazioni cutanee quali un'irritazione o un'allergia.

Per ridurre al minimo il rischio di infezioni o di reazioni cutanee:

Seguire scrupolosamente le indicazioni delle modalità d'uso. Non riutilizzare un nastro adesivo usato. Non utilizzare su ferite più lunghe o più larghe del nastro e che possono fuoriuscire da quest'ultimo. Non utilizzare un prodotto danneggiato. Benda usata da gettare.