

# URGOPORE, cerotto per pelli sensibili

Cerotto microporoso in tessuto non tessuto: lascia respirare la pelle.

## INDICAZIONI

Fissaggio/mantenimento in posizione di medicazioni o dispositivi medici su zone prive di tensione e di frizione.

## ISTRUZIONI

Applicare sulla pelle pulita e disinfettata e successivamente risciacquata e asciugata. Prevedere una lunghezza del nastro sufficiente a mantenere in posizione l'apparecchiatura medica. Sostituire almeno una volta al giorno o secondo prescrizione medica.

## PRECAUZIONI D'USO

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non applicare il cerotto a nastro direttamente su pelle danneggiata, mucose o cute umida.
- Non sterilizzare.
- La presenza concomitante di prodotti grassi o di peli può incidere sull'adesività e quindi determinare la perdita del dispositivo medico mantenuto in posizione dal cerotto (compressa, catetere...).
- Per l'uso nella parte interna del gomito, applicare il cerotto nella direzione delle pieghe del gomito.
- L'uso prolungato su materiali umidi e l'uso su zone articolari o soggette a frizione possono incidere sull'adesività e ritardare la guarigione della ferita (sostituzioni molteplici della medicazione, infezione dovuta alla mancanza di adesione della compressa o del dispositivo medico, ...)
- Il mantenimento dell'apparecchiatura medica deve essere stato spiegato o mostrato da un professionista sanitario.

## CONTROINDICAZIONI

Controindicato per fissare o mantenere in posizione sonde (ematologia, rianimazione, incubatrici).

## EFFETTI COLLATERALI

Come ogni cerotto, questo prodotto può causare reazioni cutanee quali irritazioni o dermatiti.

Per ridurre il rischio di infezione o di reazioni cutanee:

- Rispettare scrupolosamente le istruzioni per l'uso.
- Non riutilizzare un cerotto già utilizzato.
- Non applicare su occhi o mucose.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato.