

URGOSTERILE

COMPOSIZIONE

La medicazione Urgosterile è una medicazione adesiva sterile costituita da un supporto in tessuto non tessuto elastico bianco, rivestito da una massa adesiva acrilica e da una compressa in tessuto non tessuto integrata e centrata ricoperta da un velo antiaderente.

Medicazione sterile (sterilizzazione con ossido di etilene).

MODALITÀ D'USO

1. Pulire e disinfettare la ferita e la zona circostante con una soluzione antisettica. Se necessario, procedere con l'emostasi (interruzione del sanguinamento). Risciacquare con soluzione salina sterile e asciugare con una compressa sterile.
2. Aprire la busta ed estrarre la medicazione.
3. Rimuovere la prima aletta protettiva.
4. Posizionare la medicazione centrata sulla ferita evitando di toccare la parte adesiva con le dita. La ferita deve essere completamente coperta dalla compressa (parte centrale).
5. Applicare la medicazione scollando progressivamente la seconda aletta.
6. Lisciare i bordi senza creare tensione sulla pelle o sulla medicazione.

Sostituire la medicazione seguendo le modalità d'uso ogni 24-48 ore a seconda delle condizioni della ferita o della medicazione.

PROPRIETÀ

- Estensibile su un senso e adattabile, segue i movimenti delle articolazioni o della pelle.
- Microventilata, lascia respirare la ferita e previene la macerazione.
- Elevata tolleranza cutanea, rispetta la pelle.
- La compressa assorbe gli essudati senza attaccarsi alla ferita grazie al suo velo antiaderente.
- Aderente su tutti e quattro i lati, protegge completamente la ferita.

INDICAZIONI

Protezione delle ferite post-operatorie, ferite acute suturate e delle ferite superficiali non suturate.

Una ferita (o un taglio) viene definita superficiale quando raggiunge solo la pelle e il grasso immediatamente sottostante.

Se una ferita superficiale accidentale ha una dimensione superiore a 3 cm, è consigliabile consultare un medico, entro 6 ore dall'incidente, il quale deciderà se la ferita deve essere suturata o trattata (incollatura con colla chirurgica specifica, ..).

PRECAUZIONI

- Sostituire la medicazione seguendo le modalità d'uso se la medicazione è bagnata altrimenti c'è il rischio che possa causare infezioni o irritazioni.
- La rimozione della medicazione può essere facilitata se allo stesso tempo si applica una contropressione sulla pelle e/o attorno alla ferita.
- La presenza di peli o di prodotti grassi applicati sulla pelle può compromettere l'adesività.
- Medicazione sterile monouso. Non riutilizzare né riposizionare una medicazione precedentemente applicata (altrimenti rischio di infezione).
- Non risterilizzare. Prima dell'uso verificare l'integrità della protezione di sterilità. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.
- Monitorare regolarmente la ferita e la zona circostante per rilevare eventuali segni di infezione quali dolore, arrossamento, edema, odore o suppurazione.
- In caso di dubbio, di infezione, di corpi estranei nella ferita, di forte sanguinamento, di morsi, di ferita con un oggetto appuntito e/o sporco o se non si nota alcun miglioramento in termini di cicatrizzazione dopo 6 giorni, contattare il proprio medico o il personale infermieristico.

- Non utilizzare su ferite profonde non suturate, ferite sanguinanti o molto essudanti.
- Non utilizzare Urgosterile per più di 30 giorni consecutivi.
- Conservare le medicazioni nella loro confezione originale.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza (indicata sulla busta e sulla confezione).