

# URGOSTRIPS, sutura chirurgica adesiva sterile

## DESCRIZIONE

Urgostrips è un dispositivo medico che si presenta sotto forma di cerotti pre-tagliati, stesi su un supporto siliconato, con doppie alette, il tutto posto all'interno di una bustina sterile. Ogni cerotto Urgostrips è composto da un supporto posteriore in tessuto non tessuto, rivestito con una massa adesiva. Sterile (sterilizzato con ossido di etilene).

## PROPRIETÀ

Le suture adesive sterili Urgostrips promuovono un processo di cicatrizzazione estetica, grazie alla loro elevata resistenza alle rotture, all'alta aderenza e all'elevata tolleranza cutanea.

## INDICAZIONI

Chiusura rapida e sterile di ferite superficiali e incisioni chirurgiche. In particolare:

- Sutura per piccola chirurgia d'urgenza, chirurgia dermatologica, chirurgia plastica e incisioni post-operatorie di piccole dimensioni (< 2.5 cm)
- Suture primarie su ferite superficiali o non sottoposte a carico
- Come rinforzo secondario fra punti o suture o come sostituto dopo il 3° giorno per limitare il rischio di danno estetico
- Suture sotto a gessi o resine

Un taglio (o una ferita) è considerato superficiale se ha lesa solo la cute e lo strato di grasso immediatamente sottostante.

Qualora una ferita superficiale accidentale superi i 3 cm, è opportuno rivolgersi a un medico entro le 6 ore successive all'incidente al fine di determinare se la ferita deve essere suturata o curata (chiusa con un adesivo chirurgico specifico, ...)

## MODO D'USO

Per le persone di età inferiore ai 16 anni, deve essere applicato da un adulto.

1. Pulire e disinfettare la ferita e l'area circostante servendosi di una soluzione antisettica. Ove necessario, bloccare il sanguinamento. Asciugare con una compressa sterile al fine di migliorare l'adesione dei cerotti.
2. Aprire la confezione in modo asettico. Qualora sia necessario tagliare i cerotti, utilizzare forbici sterili o precedentemente disinfettate con alcol.
3. Dopo essersi lavati le mani in modo accurato con acqua e sapone, applicare 2 cerotti paralleli nel senso della lunghezza sui due lati della ferita (Vedi illustrazioni sulla confezione).
4. Evitare di toccare con le dita la parte di cerotto che andrà a contatto con la ferita. Applicare una terza striscia in perpendicolare su un'estremità della ferita; tirandola delicatamente, applicarla sul lato opposto per avvicinare le due estremità della ferita, senza che vi siano sovrapposizioni.
5. Applicare i cerotti successivi allo stesso modo \_no a che la chiusura della ferita non sarà completa. Completare l'operazione applicando 2 cerotti perpendicolarmente per rinforzare il tutto.

Lasciare i cerotti in posizione (da 3 a 4 giorni) \_no a che non si distaccano o perdono la loro funzionalità. Sostituire i cerotti secondo le istruzioni per l'uso fino alla cicatrizzazione completa. La ferita deve restare asciutta. La cicatrizzazione primaria di una ferita superficiale richiede indicativamente dieci giorni. (Vedi illustrazioni sulla confezione).

## PRECAUZIONI PER L'USO

- La presenza di peli e l'uso di prodotti oleosi come creme o pomate potrebbe influire sull'aderenza del cerotto.
- Cerotti sterili monouso. Non ri-utilizzare o ri-posizionare un cerotto già applicato; non tenere un cerotto in una confezione aperta (rischio di infezione).
- Non ri-sterilizzare. Controllare l'integrità del confezionamento sterile prima dell'uso. Non usare se la confezione è danneggiata.
- Al fine di limitare il rischio di infezione secondaria della ferita, consigliamo di coprire il tutto con una fasciatura antisettica. Non togliere né cambiare le strisce al termine di ogni rinnovo della fasciatura.
- La guarigione della ferita viene facilitata posizionando i cerotti in modo da evitare spazi o sovrapposizioni fra le estremità della ferita.
- Controllare regolarmente la ferita e l'area circostante per rilevare eventuali segnali di infezione quali ad esempio dolore, rossore, edema, cattivi odori o pus. In caso di eventuali dubbi o infezioni, contattare un professionista sanitario.

- Conservare le confezioni all'interno della loro scatola originale.
- Non usare oltre la data di scadenza (indicata sulla bustina e sulla confezione).

**CONTROINDICAZIONI**

- Non usare su ferite infette, ferite essudanti o che sanguinano.
- Non applicare sugli occhi o sulle palpebre.
- Non usare sulle articolazioni (rischio di tensioni elevate o di rottura dei cerotti).
- Non usare Urgostrips per più di 30 giorni consecutivi.