

# URGOSYVAL, cerotto resistente

Cerotto in tessuto bianco micro-areato: lascia respirare la pelle.

## INDICAZIONI

Fissaggio/mantenimento in posizione di medicazioni e dispositivi medici, in particolare in zone di frizione o di trazione.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare sulla pelle pulita, disinfettata, sciacquata e asciutta. Risciacquare con soluzione fisiologica dopo aver usato un antisettico. Asciugare accuratamente la ferita e l'area circostante prima di applicare Urgosyval. Il cerotto è facilmente strappabile in maniera da adattare la lunghezza del nastro all'uso. Urgosyval è concepito per aderire alla pelle sana. Non applicare il nastro direttamente su pelle danneggiata o sulle mucose. Rimuovere delicatamente e sostituire ogni 24 ore o secondo prescrizione medica.

## PRECAUZIONI PER L'USO / CONTROINDICAZIONI

Tenere fuori dalla portata dei bambini. La presenza concomitante di grasso, umidità o peli può influenzare l'adesività. Per evitare irritazioni e ritardi nella guarigione, non superare le due applicazioni al giorno. Urgosyval non è adatto per il fissaggio / mantenimento in posizione di apparecchiature o sonde umide (ematologia, terapia intensiva, incubatrici). Non applicare il nastro direttamente su pelle danneggiata o mucose (rischio di irritazione, infiammazione, dolore). Quando si applica il prodotto, non creare tensioni sulla pelle o sul nastro (rischio di irritazione, effetto laccio emostatico). Al fine di mantenere le condizioni di guarigione ottimali, sostituire il nastro se umido. Sostituire in caso di perdita di adesività. Non utilizzare Urgosyval per più di 30 giorni consecutivi. Non sterilizzare Urgosyval né sottoporlo ad alcun trattamento prima dell'uso.

## EFFETTI COLLATERALI

Questo nastro può causare reazioni cutanee quali arrossamenti, irritazioni, dermatiti o dolore durante la rimozione, in particolare su pelle secca o danneggiata. In caso di reazione locale o di prurito, sospendere l'uso del prodotto e consultare il proprio medico.

## PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFEZIONE O DI REAZIONI CUTANEE

Rispettare scrupolosamente le istruzioni per l'uso. Non riutilizzare un cerotto già utilizzato. Non applicare su occhi o mucose. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Non utilizzare il prodotto se danneggiato.